

	FICHA TECNICA POLVO DESMANCHADOR PROQUIDENT	Código GC-FT-18
		Versión 05
		Página 1 de 3

Partida Arancelaria	3306.90.00.00
----------------------------	---------------

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Polvo fino homogéneo, libre de partículas extrañas.
COLOR	Rosado claro
OLOR	Tutifruti – canela según estándar
SABOR	Tutifruti – canela
pH (SOLUCIÓN AL 1 %)	8,5 – 10,0
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO	Carbonato de Calcio 40 %
	Fosfato dicálcico anhidro 35 %
	Fosfato tricálcico 1 %

MICROBIOLOGICO (Resolución 1482 de 2012)	
Mesófilos	< 100 UFC/ mL
Patógenos	Ausencia de <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , Coliformes totales y <i>Escherichia coli</i> .
Mohos y Levaduras	< 100 UFC/ mL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
USOS	<p>Polvo abrasivo usado para profilaxis; el cual provee tersura y alto pulimiento, sin rayar el esmalte dental.</p> <p>Elimina las manchas superficiales producidas por el consumo de sustancias ricas en taninos y colorantes tales como café, té, licor y tabaco.</p> <p>Modo de empleo: Tomar una cantidad suficiente del producto y colocarlo en un dappen, proceder a realizar la profilaxis bien seca con cepillo o copa de caucho. Para desmanchar colocar una pequeña cantidad sobre el cepillo húmedo, cepillar y luego enjuagar. No es necesario utilizar dentífrico luego de usar el Polvo Desmanchador.</p>

	FICHA TECNICA POLVO DESMANCHADOR PROQUIDENT	Código GC-FT-18
		Versión 05
		Página 2 de 3

	<p>Usar según criterio del odontólogo (para profilaxis).</p> <p>Usar solo una o dos veces al mes (como desmanchador).</p> <p>Contraindicaciones: Cuellos sensibles.</p>
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Envase en PEAD por 175 y 500 g y blíster con envase en PEAD por 10 g.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2019DM-0020257, vence 05/08/2029
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años
EAN 13 PRESENTACIÓN 10 g	7702314130109
EAN 13 PRESENTACIÓN 175 g	7702314230120
EAN 13 PRESENTACIÓN 500 g	7702314230113

PRESENTACIONES COMERCIALES



10 g



500 g

175 g