

	FICHA TECNICA CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTAL SABOR MENTA PROQUIDENT	Código GC-FT-97
		Versión 03
		Página 1 de 6

Partida Arancelaria	3306.90.00.00
----------------------------	---------------

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Masa viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Incolora
OLOR	Menta
SABOR	Menta
GRAVEDAD ESPECÍFICA	INFORMATIVA
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO	Sal Sódica y Cálcica de Polimetilvinileter y Anhídrido Maleico 33 %
VISCOSIDAD A 24 °C (TORQUE %)	1500 – 5500 cP, Aguja N° 04 a 12 RPM En una proporción de 70 % producto y 30 % aceite mineral. (20 – 80 %)

DESCRIPCIÓN	EL PRODUCTO
FUERZA DE ADHESION	4,5 – 6,5 (Kilogramos fuerza)

	FICHA TECNICA CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTAL SABOR MENTA PROQUIDENT	Código GC-FT-97
		Versión 03
		Página 2 de 6

USOS	<p>Crema adhesiva con la propiedad de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener las prótesis dentales fijas. Incrementa la fuerza de mordida 38 % en comparación con las prótesis sin adhesivo. • Forma un sello que impide la entrada de alimentos dentro de la Prótesis dental, disminuyendo la proliferación de bacterias que causan el mal aliento <p>Modo de empleo: Retirar la prótesis dental después de cada comida. Lavar y aplicar nuevamente la crema (Por higiene). Aplicar tres pequeñas porciones de adhesivo (de aprox. 1 cm.) en la parte posterior y frontal de la prótesis, no demasiado cerca de los bordes. Variar la cantidad aplicada de acuerdo a la necesidad. Coloque la prótesis correctamente en la boca y presione por</p>
	<p>varios segundos para garantizar una correcta adherencia. Una vez utilizado el producto limpiar la boca del tubo y tapar inmediatamente. Abstenerse del consumo de líquidos calientes durante 5 minutos. Si observa alguna reacción de hipersensibilidad suspender su uso y visitar al odontólogo.</p>
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Tubo colapsible por 25 y 40 g
REGISTRO SANITARIO	2016DM-0000237-R1, vence 11/07/26

	FICHA TECNICA CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTAL SABOR MENTA PROQUIDENT	Código GC-FT-97
		Versión 03
		Página 3 de 6

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto</p>
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años
EAN 13 PRESENTACIÓN 25 g	7702314700685
EAN 13 PRESENTACIÓN 40 g	7702314700456

PRESENTACION COMERCIAL 25 g

	FICHA TECNICA CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTAL SABOR MENTA PROQUIDENT	Código GC-FT-97
		Versión 03
		Página 4 de 6



PRESENTACION COMERCIAL 40 g



	FICHA TECNICA CREMA ADHESIVA PARA PRÓTESIS DENTAL SABOR MENTA PROQUIDENT	Código GC-FT-97
		Versión 03
		Página 5 de 6



Proquident
Más Bienestar

LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA
Gerente Técnica

✉ calidad@proquident.com.co

Autopista Medellín - Bogotá entre retornos 11 y 12 Vereda Garrido | Guarne - Colombia
PBX: (574) 2886055 ext: 132 | FAX: (574) 2884999 | proquident.com.co ⓘ

ANEXOS

Presentación x 25 g

UNIDAD INDIVIDUAL						UNIDAD DE EMPAQUE					
PESO NETO (gramos)	PESO BRUTO (gramos)	ALTO (CM)	ANCHO (CM)	PROFUNDO (CM)	VOLUMEN (CM)3	UN. EMP	PESO UE (kg)	ALTO (CM)	ANCHO (CM)	LARGO (CM)	VOLUMEN (CM)3
25	40.00	3.5	4	10.5	147.0	12	0.64	6.5	24	27	4212.0

EAN 13:

EAN 14: