

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
Aspecto	Bolsa plástica tipo Doy Pack PET/ Flexible Transparente sin impresión. Franjas a cada lado color azul, blanco verde, fucsia, con ventana en la parte anterior dónde se puede observar el contenido. Información correcta según estándar, sin burbujas de aire y totalmente centrada. Posee fuelle de fondo abierto que permite que la bolsa permanezca vertical. El abre fácil debe ir en la parte superior del selle hermético (ziploc).
Color	13 Flosser color verde, 13 Flosser color naranja, 14 Flosser color morado
Olor	Según estándar
Sabor	Según estándar
pH Directo (Según aplique)	No Aplica
Densidad (según certificado de análisis)	No Aplica
Material Particulado	Ausencia
Contenido Principio Activo	No Aplica
Viscosidad (Torque%)	No Aplica
MICROBIOLÓGICO (Resolución 1482 de 2012)	
Mesófilos	< 100 UFC/ mL
Patógenos (Cuales)	Ausentes
Hongos y Levaduras	< 100 UFC/ mL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
Usos	De forma fácil y segura, remueve la placa dentobacteriana de los espacios interdentes y evita la inflamación de las encías, la formación de caries, cálculos dentales y enfermedades periodontales.
Modo de Empleo	Tomar el arco de seda dental por el mango de fácil agarre, introducir la seda dental entre los dientes y molares, realizando movimientos de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo,

	FICHA TECNICA FLOSSER KIDS PROQUIDENT	Código GC-FT-676
		Versión 02
		Página 2 de 3

	llegando hasta el interior de la encía para remover la placa dentobacteriana que el cepillo dental no alcanza a eliminar.
Presentación Comercial (Todas las codificadas)	Bolsa por 40 unidades
Condiciones De Almacenamiento	Almacenar a una temperatura menos de 30°C.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	Mantener lejos del alcance de los niños, su uso está limitado a la cavidad bucal.
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	Tres años a partir de su fabricación
REGISTRO SANITARIO	INVIMA N°. 2017DM-0016095, Vence: 15-03-2027
EAN 13	7702314316299
EAN 14	17702314316296

PRESENTACIÓN COMERCIAL

