

	FICHA TECNICA KIT PERSONAL KIDS PROQUIDENT	Código GC-FT-108
		Versión 03
		Página 1 de 3

Partida Arancelaria Crema Dental	3306.10.00.00
Partida Arancelaria Cepillo Dental	9603.21.00.00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
CONTENIDO	CANTIDAD	REGISTRO INVIMA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL
Crema dental kids Proquident x 25 mL	1 unidad	NSOC80138-17CO, vence 24/07/2024	3 años
Cepillo dental niño 320 bicomponente	1 unidad	2017DM-0001210-R1, vence 15/09/2027	No aplica
Protector de cepillo	1 unidad	No aplica	No aplica
Estuche	1 unidad	No aplica	No aplica
EAN 13	7702314180616		
MICROBIOLOGICO (Resolución 1482 de 2012)			
Mesófilos	< 100 UFC/ mL		
Patógenos	Ausencia de <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , Coliformes totales y <i>Escherichia coli</i> .		
Mohos y Levaduras	< 100 UFC/ mL		
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO			
<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados, cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto</p>			



**FICHA TECNICA
KIT PERSONAL KIDS
PROQUIDENT**

Código GC-FT-108

Versión 03

Página 2 de 3

OTRAS ESPECIFICACIONES

CREMA DENTAL

ASPECTO	Gel viscoso homogéneo, libre de partículas extrañas
COLOR	Verde con destellos
OLOR	Característico a Chicle
SABOR	Chicle
pH DIRECTO A 24 °C	5,8 a 6,8
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,1000 - 1,4000
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia
VISCOSIDAD A 24 °C (TORQUE %)	90000 – 190000 cP, Aguja N° 07 a 10 RPM (20 – 80 %)
USOS	<p>Crema dental con efectiva acción limpiadora que brinda una limpieza efectiva ayudando a mantener la salud oral de los niños, deja un agradable sabor a chicle y aliento fresco. Libre de sulfatos y parabenos; y no contiene flúor lo que la hace adecuada para el uso de niños menores de 6 años.</p> <p>Debe usarse regularmente con un correcto cepillado o según recomendaciones del odontólogo.</p> <p>Edad recomendada: a partir de los 2 hasta los 6 años o según recomendación del odontólogo.</p> <p>Aplicar lo equivalente a una “lenteja” en el cepillo, su empleo debe realizarse con supervisión de un adulto para reducir al mínimo la ingesta del producto.</p> <p>Si observa algún tipo de reacción: irritación, intolerancia local o sensibilización, presencia de alergias, suspenda el uso y consulte con el médico.</p>

	FICHA TECNICA KIT PERSONAL KIDS PROQUIDENT	Código GC-FT-108
		Versión 03
		Página 3 de 3

CEPILLO DENTAL		
ASPECTO	Cepillo en poliestireno-polipropileno con cerdas de nylon redondeadas, de colores y figuras surtidos.	
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia	
TEXTURA DE LAS CERDAS	Suave	
DIMENSIONES	Orificios en la cabeza	28 - 32 agujeros
	Filamentos por agujero	20 – 30 filamentos
	Altura de las cerdas	9,0 mm ± 0,5 mm
	Largo total	153 mm ± 2 mm
USOS	Diseñado especialmente para lograr una efectiva remoción de la placa bacteriana sin lastimar las encías, disminuyendo la incidencia de caries y cálculo dental.	

PRESENTACION COMERCIAL





LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA
Gerente Técnica

calidad@proquident.com.co