

	FICHA TECNICA CREMA ADHESIVA DE PROTESIS DENTAL PROQUIDENT MENTA	Código GC-FT-97
		Versión 01
		Página 1 de 4

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Masa viscosa, homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Incolora
OLOR	Menta
SABOR	Menta
DENSIDAD	Informativa
CONTENIDO DE PRINCIPIO ACTIVO	33 % Sal sódica y cálcica de polimetilvinileter y anhídrido maleico
VISCOSIDAD	En una proporción de Mezcla 70 % Crema Adhesiva, 30 % Aceite Mineral. Equipo Brookfield DV-I PRIME Aguja N° 06 a 12 RPM 1500-5500 cP
FUERZA DE ADHESION	4.5-6.5 (Kilogramos fuerza)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	<p>Crema adhesiva con la propiedad de mantener las prótesis dentales fijas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incrementa la fuerza de mordida 38 % en comparación con las prótesis sin adhesivo. • Forma un sello que impide la entrada de alimentos dentro de la Prótesis dental, disminuyendo la proliferación de bacterias que causan el mal aliento
USOS Y PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Retirar la prótesis dental después de cada comida. • Lavar y aplicar nuevamente la crema (Por higiene) • Aplicar tres pequeñas porciones de adhesivo (de aprox. 1 cm.) en la parte posterior y frontal de la prótesis, no demasiado cerca de los bordes. Variar la cantidad aplicada de acuerdo a la necesidad. • Coloque la prótesis correctamente en la boca y presione por varios segundos para garantizar una correcta adherencia • Una vez utilizado el producto limpiar la boca del tubo y tapar inmediatamente • Abstenerse del consumo de líquidos calientes durante 5 minutos

	FICHA TECNICA CREMA ADHESIVA DE PROTESIS DENTAL PROQUIDENT MENTA	Código GC-FT-97
		Versión 01
		Página 2 de 4

	<ul style="list-style-type: none"> • Si observa alguna reacción de hipersensibilidad suspender su uso y visitar al odontólogo
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Tubo colapsible x 40 g
NOTIFICACION SANITARIA	2016DM-0000237-R1, vence 11/07/2026
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados, cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.</p> <p>Procure mantener el producto en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
TIEMPO DE VIDA UTIL	3 años
EAN 13 25 g	7702314700685
EAN 13 40 g	7702314700456

	FICHA TECNICA CREMA ADHESIVA DE PROTESIS DENTAL PROQUIDENT MENTA	Código GC-FT-97
		Versión 01
		Página 3 de 4

PRESENTACION COMERCIAL



 Más Bienestar	FICHA TECNICA CREMA ADHESIVA DE PROTESIS DENTAL PROQUIDENT MENTA	Código GC-FT-97
		Versión 01
		Página 4 de 4



Más Bienestar

LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA
Gerente Técnica

 calidad@proquident.com.co

Autopista Medellín - Bogotá entre retornos 11 y 12 Vereda Garrido | Guarne - Colombia
PBX: (574) 2886055 ext: 132 | FAX: (574) 2884999 | proquident.com.co  