
	FICHA TECNICA DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROQUIZYME	Código GC-FT-535
		Versión 05
		Página 1 de 4

Partida Arancelaria	3808.94.19.00
----------------------------	---------------

ENSAYO	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Líquido transparente cristalino
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
pH DIRECTO	6,0 – 8,0
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,9628 – 0,9690
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO	Cloruro de Alquildimetilbencilamonio y Cloruro de Alquildimetiletilbencilamonio 0,5% de materia activa
	Alcohol etílico 20 %

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
USOS	<p>Desinfectante de Dispositivos Médicos con Neutralizador de Olores. Fórmula avanzada con agentes detergentes y amonios de quinta generación, para la desinfección de equipos y superficies de uso Odontológico y Médico Hospitalario.</p> <p>Además de su acción bactericida, virucida y fungicida; posee dentro de su formulación moléculas para neutralizar los olores.</p> <p>Puede ser utilizado para la desinfección de unidades odontológicas, camillas ubicadas en hospitales e instituciones médicas u odontológicas.</p> <p>Modo de empleo: Aplicar el producto sobre los equipos o superficies a desinfectar. Dejar actuar por mínimo un minuto. Limpiar en una sola dirección con un paño limpio y seco, preferiblemente de tela no tejida.</p> <p>No mezclar con jabones que contengan desinfectantes aniónicos o blanqueadores, porque perderá su acción.</p>

	FICHA TECNICA DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PROQUIZYME	Código GC-FT-535
		Versión 05
		Página 2 de 4

PRESENTACIÓN COMERCIAL	Envase con sistemas de aspersion por 240 y 500 mL y garrafa por 3800 mL (3,8 L)
REGISTRO SANITARIO	2015DM-0013578, vence 01/09/2025
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<p>Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible.</p> <p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos.</p> <p>Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	2 años
EAN 13 PRESENTACIÓN 240 mL	7702314240532
EAN 13 PRESENTACIÓN 500 mL	7702314240518
EAN 13 PRESENTACIÓN 3800 mL (3,8 L)	7702314240587

PRESENTACIÓN COMERCIAL 240 mL



PRESENTACIÓN COMERCIAL 500 mL



PRESENTACIÓN COMERCIAL 3800 mL (3,8 L)

